

Man(n) sieht den Erfolg.



BELOTERO[®]
Der Hyaluronsäure-Filler mit CPM[®]


Kann man Erfolg sehen?

Männer, die erfolgreich sind, sehen meistens auch so aus. Sie strahlen Dynamik und Kraft aus, wirken frisch und vital. Was aber geschieht, wenn Mann älter wird? Die Spannkraft und Elastizität der Haut lässt nach und aus Fältchen werden Falten, die sich im Laufe der Zeit verstärken, tiefer und immer zahlreicher werden. Dadurch wirkt das Gesicht

müde und kraftlos. Wenn Sie in den Spiegel schauen und meinen, Sie sehen älter und abgesspannter aus als Sie sich fühlen, dann sollten Sie handeln.

Kann die Ausbildung von Falten aufgehalten werden?

Ja, störende Falten müssen nicht sein. Sie können den sichtbaren

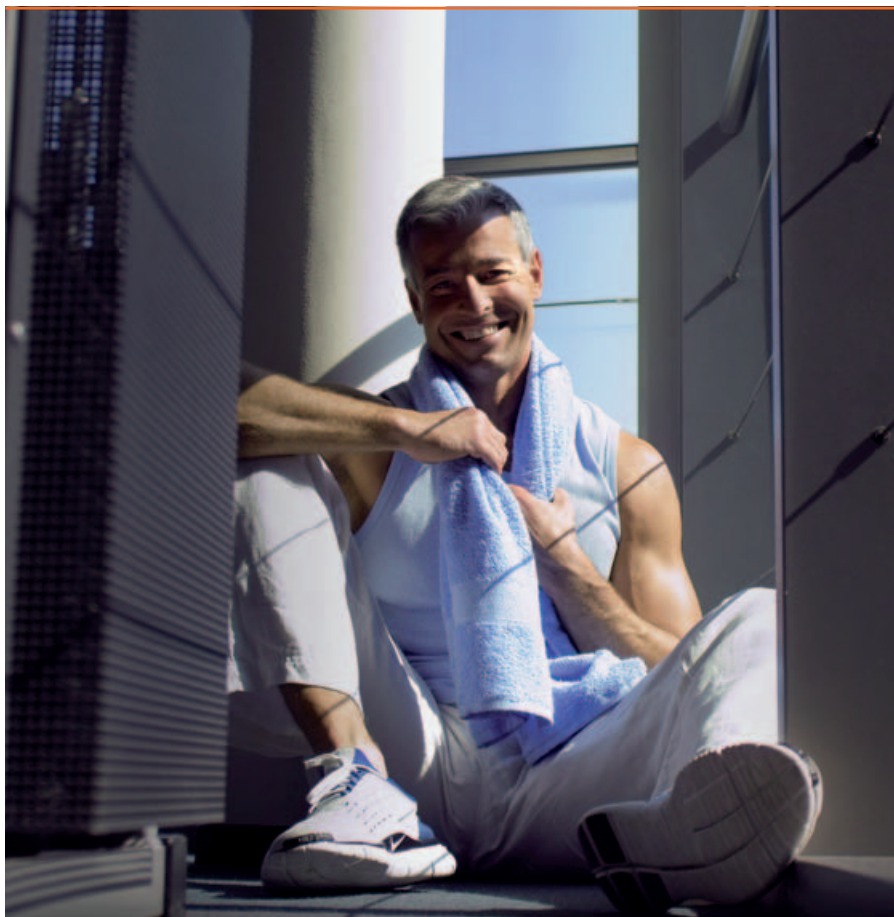

Alterungsprozess der Haut einfach und unkompliziert verzögern, damit Sie wieder erholt, gesund und dynamisch aussehen. Deshalb nutzen immer mehr Männer die Vorteile des Dermal-Fillers Belotero®.

Was kann Belotero®?

Belotero® ist ein innovatives, hyaluronsäurehaltiges Gel, mit dem Falten gezielt korrigiert und das Lippenvolumen aufgebaut werden können. Es wird so injiziert, dass es ein Polster bildet und die Falte deutlich gemindert wird.

Ihr Gesicht wirkt sofort frischer, entspannter und vitaler.


Was bedeutet CPM®-Technologie?

CPM® steht für „Cohesive Polydensified Matrix“, man kann diese Begriffe mit „zusammenhängende, mehrfach verdichtete Struktur“ übersetzen.


Praktisch bedeutet es, dass Belotero® durch ein spezielles Herstellungsverfahren über unterschiedliche Dichtezonen verfügt, das Gel besonders stabil ist und sich leicht injizieren lässt.

Was ist das Besondere an einem Dermal-Filler mit CPM®?

Nur ein Hyaluronsäure-Gel, das mit der speziellen CPM®-Technologie

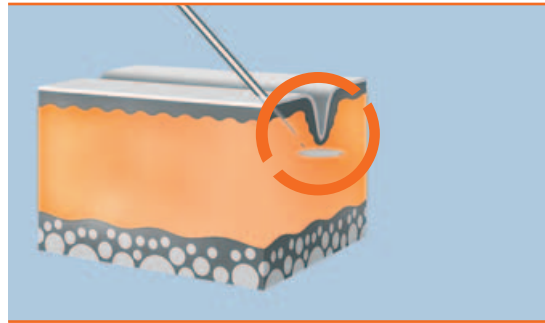

Vor der Behandlung

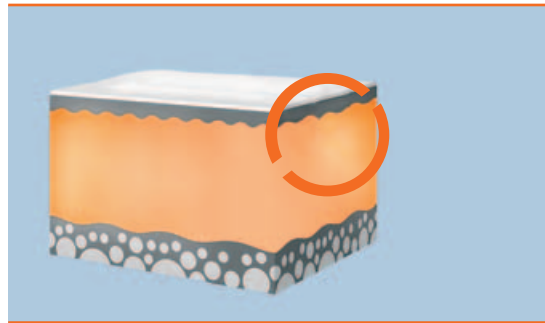

Nach der Behandlung mit **Belotero®**


hergestellt wurde, vereint dichtere und weniger dichte Zonen.

So kann das Gel gleichmäßig in die unterschiedlich ausgeprägten intradermalen Spalträume in der Haut vordringen, ohne auseinander zu reißen oder wie man sagen würde: „den Zusammenhang zu verlieren“. Dadurch kommt es zu einem harmonischen Ergebnis mit besonders weichen und unauffälligen Übergängen zwischen behandelten und nicht behandelten Bereichen. Das Behandlungsergebnis wirkt deshalb besonders natürlich.

Welche Falten stören Sie?

Belotero® Basic ist ideal geeignet zur gezielten Korrektur mittlerer bis tiefer Falten, wie z.B. Stirnfalten,

Falten um Nase oder Mund sowie zur Volumenauffüllung von Lippen.

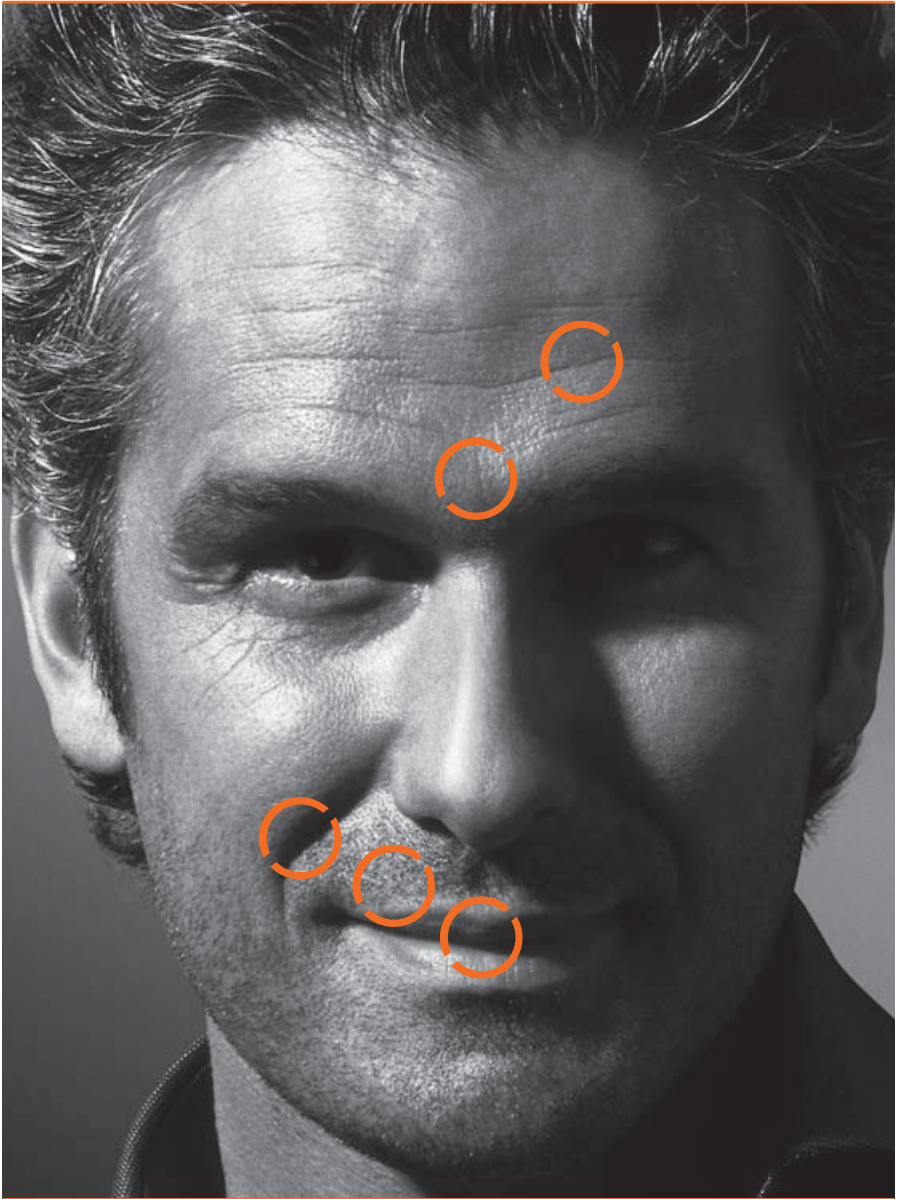

Gibt es einen Sofort-Effekt?

Ja. Für eine effektive Anti-Falten-Behandlung mit Belotero® ist meist nur eine Sitzung beim Arzt nötig. Sie dauert im Durchschnitt 30 Minuten. Der Effekt ist sofort sichtbar: Ihr Gesicht wirkt erholt, glatt und vital.

Wie lange hält der Belotero®-Effekt?

Die Behandlung mit Belotero® ist lang anhaltend, aber nicht permanent. Mit der Zeit wird die Hyaluronsäure auf natürliche Weise abgebaut.

Nach einigen Monaten können Sie neu entscheiden, ob Sie die Behandlung fortsetzen wollen.

Die meisten Patienten frischen den Belotero®-Effekt alle 6-12 Monate auf, um dauerhaften Erfolg zu erzielen.

Wie verträglich ist Belotero®?

Belotero® besteht aus mehrfach vernetzter Hyaluronsäure, die in ihrer ursprünglichen unvernetzten Form auch im menschlichen Körper vorkommt.

Dadurch ist vor der Behandlung kein Allergietest nötig. Die Behandlung kann sicher, zuverlässig und unkompliziert durchgeführt werden. Belotero® ist sehr gut verträglich und wird vom Körper abgebaut.



Ist eine Betäubung notwendig?

Eine Betäubung ist nicht notwendig, aber problemlos möglich.

Die Behandlung mit Belotero® ist einfach und weitgehend schmerzarm. Wenn Sie es wünschen, kann eine betäubende Creme oder eine Lokalanästhesie angewandt werden. Anschließend wird Belotero® mit einer sehr feinen Nadel injiziert. Nach einer ausführlichen Beratung durch den Arzt kann die Behandlung direkt erfolgen. Schnell und zielführend.

Was kostet eine Behandlung?

Die Behandlungskosten variieren je nach Behandlungsumfang. Der komplette Kostenrahmen bewegt sich erfahrungsgemäß zwischen 250 und 500 Euro pro behandelter Region.

Wie sehen die Resultate 6 Monate nach einer Behandlung aus?

Belotero® Basic wurde im Rahmen einer multizentrischen klinischen Studie* mit 114 Patienten im Alter von 30 bis 60 Jahren mit hervorragenden Ergebnissen getestet. Sowohl die lang anhaltende Wirkung als auch die sehr gute Verträglichkeit haben Ärzte und Patienten gleichermaßen überzeugt.

Nachfolgend sehen Sie zwei Beispiele aus der Studie, die belegen, dass nach einmaliger Behandlung

der Nasolabialfalten die kosmetischen Ergebnisse auch 6 Monate nach der Behandlung immer noch exzellent sind.

In 66 % der Fälle sind die Erfolgsraten selbst nach 9 Monaten noch mehr als zufriedenstellend.

Natürliches und erholtes Aussehen wird mit Belotero® Basic leicht gemacht.

*Prospektive, multizentrische, nicht kontrollierte klinische Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Belotero® Basic nach einmaliger bilateraler Implantation in Nasolabialfalten, Merz Pharmaceuticals

Belotero® Basic bei Nasolabialfalten





Muss ich mit Ausfallzeiten rechnen?

Nein. Denn Belotero® Basic wird mit einer sehr feinen Nadel in geringer Menge direkt in die mittlere bis tiefe Hautschicht injiziert und füllt die Falte von unten auf. Schon nach kurzer Zeit sind die Einstichstellen nicht mehr sichtbar.

Sie brauchen keine beruflichen oder privaten Ausfallzeiten nach der Be-

handlung einzuplanen! Zum Beispiel können Sie für die Behandlung in der Mittagspause zu einem Facharzt Ihres Vertrauens gehen und nachmittags wieder an Ihrem Arbeitsplatz sein. Sehr begehrt sind auch die Freitagstermine, damit Sie nach der Behandlung bereits optisch erholt ins Wochenende gehen können. Der natürlich wirkende Sofort-Effekt von Belotero® Basic macht es möglich!

Auf Erfolgskurs mit Belotero®

- überzeugender Sofort-Effekt
- lang anhaltende Wirkdauer
- natürliches, vitales Aussehen
- sehr gut verträglich
- 100% abbaubar
- keine Ausfallzeiten

Ästhetik-Sprechstunde. Wie finde ich den richtigen Arzt?

Wie in vielen anderen Bereichen sind auch bei Faltenbehandlungen die richtige Aus- und Weiterbildung sowie umfangreiche Erfahrungen des Facharztes in der Anwendung von Dermal-Fillern wichtig.

Gerne beraten wir Sie deshalb in unserer Praxis zum Thema „erfolgreiche Faltenbehandlung“. Bitte sprechen Sie uns an!

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Wenn Sie weitere Informationen zum Thema Faltenbehandlung wünschen oder Fragen haben, besuchen Sie uns im Internet unter **www.belotero.de** oder schreiben eine E-Mail an **info@belotero.de**.



Praxisstempel

Hergestellt von: ANTEIS S.A., 18, Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Quates, Geneva/Switzerland

Vertrieb Deutschland: Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main

Österreich: Merz Pharma Austria GmbH, 1110 Wien; Schweiz: Merz Pharma (Switzerland) AG, Alschwill;

Italien: Merz Italia, Milano

Art.-Nr. 48749 Stand: 08/07

BELOTERO[®]
Der Hyaluronsäure-Filler mit CPM[®]